

Порядок надевания СИЗ



1. Надеть сапоги



2. Надеть защитный комбинезон поверх сапог, без капюшона



3. Надеть респиратор



4. Надеть капюшон защитного комбинезона

5. Застегнуть молнию, проклеить костюм, сняв защитную ленту и надеть защитные очки

6. Надеть медицинские перчатки и заправить их под комбинезон

7. Надеть вторые перчатки (КШС) поверх комбинезона

Порядок снятия СИЗ



После выхода из очага, обработать СИЗ дез.раствором



1. Зайти на дез.барьер с дез. раствором для обработки подошв. Продезинфицировать часть сапог, выступающую из-под защитного костюма

2. Продезинфицировав верхние перчатки (КШС), снять их и положить в емкость с дез. раствором либо в упаковку



3. Снять очки, оттягивая их двумя руками вперед, вверх и назад за голову. После снятия положить очки в емкость с дезраствором

4. Продезинфицировать медицинские перчатки

5. Снять капюшон, выворачивая наружу, и сразу продезинфицировать перчатки

6. Расстегнуть молнию и снять защитный комбинезон, выворачивая внутрь, после чего продезинфицировать перчатки



7. Поместить защитный комбинезон, верхние перчатки в двойную упаковку и передать в специализированную организацию для утилизации (сжиганию)

8. Продезинфицировать медицинские перчатки

9. Снять респиратор, не касаясь лицом его наружной стороны, поместить в дез.раствор, продезинфицировать перчатки

10. Продезинфицировать сапоги, снять их и погрузить в дез.раствор, снять медицинские перчатки, положить их в дез.раствор.

11. Руки обработать антисептиком, затем тщательно вымыть с мылом